

Pozorne si prosím prečítajte návod na použitie skôr, ako začnete používať túto zdravotnícku pomôcku. Obsahuje pre vás dôležité informácie. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik alebo kontaktujte priamo dodávateľa.

**BAUSCH + LOMB**

(SK)

# Hyal-Drop® multi

**Zloženie:** 2,4 mg/ml kyselina hyaluronová, (vo forme sodnej soli). Obsahuje pomocné látky: chlorid sodný, chlorid draselný, hydrogénofosforečnan sodný, dodekahydrát; hydrogénofosforečnan sodný, dihydrát, voda na injekciu.

**Spôsob použitia:** očné kvapky na zvlhčenie očí a opakované zvlhčovanie mäkkých aj tvrdých kontaktných šošoviek počas ich nosenia.

### Čo je Hyal-Drop® multi

Hyal-Drop® multi je číry očný roztok, ktorý obsahuje 2,4 mg/ml kyseliny hyaluronovej (vo forme sodnej soli).

Hyal-Drop® multi neobsahuje konzervačné látky a preto je veľmi dobre znášaný. Hyal-Drop® multi prináša rýchlu a dlhotrvajúcu úľavu od príznakov suchého oka. Prípravok po otvorení môžete používať po dobu 6 mesiacov.

### Na čo sa Hyal-Drop® multi používa

Hyal-Drop® multi sa používa pre okamžitú úľavu a zvlhčenie suchých očí. Prírodné ukladňuje a osviežuje suché oči a zmiernuje príznaky unavených, podráždených a slziacich očí.

Hyal-Drop® multi je vhodný na zvlhčenie očí a opakované zvlhčovanie mäkkých aj tvrdých kontaktných šošoviek, citelne spríjemňuje ich nosenie počas celého dňa.

### Kedy je vhodné používať Hyal-Drop® multi

Hyal-Drop® multi je prípravok pre okamžitú pomoc. Obsahuje prirodzenú zvlhčovaciu zložku, kyselinu hyaluronovú (vo forme sodnej soli), ktorá sa nachádza v štruktúrach zdravého ľudského oka a v prirodzenom slznom filme.

**Hyal-Drop® multi** je vytvorený tak, aby zostal na povrchu oka a poskytol

intenzívne zvlhčenie pre okamžitú, dlhotrvajúcu úľavu od príznakov suchého oka. Je to ideálny prípravok pre každého, kto trpí príznakmi suchých očí ako sú unavené, namáhané oči, pocit cudzieho predmetu v očiach, pocit pálenia a/alebo nadmerne slzenie očí.

Suchoť očí môže byť spôsobená:

- **vonkajšími faktormi**, ako napr. dlhodobá práca s počítačom, pobyt v klimatizovaných priestoroch, cigaretový dym, veterné počasie alebo používanie kontaktných šošoviek

- **inými faktormi**, ako napr. užívanie niektorých liekov/liečiv (ako sú hormonálna antikoncepcia, antihistaminiká, betablokátory, antispasmodiká, diuretiká) alebo určité ochorenia, ktoré spôsobujú vznik syndrómu suchého oka


### Ako často a ako dlho používať Hyal-Drop® multi

Podľa potreby kvapnite **1 kvapku** Hyal-Drop® multi do spojkového vaku. Hyal-Drop® multi môžete používať každý deň tak často, ako potrebujete. Dĺžka používania nie je obmedzená.


### Ako používať Hyal-Drop® multi

**Upozornenie:** Pred každým použitím prípravku si umyte ruky. Zabráňte kontaktu hrotu fľaštičky s prstami alebo okom/očami, aby sa zabránilo zraneniam alebo akejkoľvek novej kontaminácii roztoku.


Nižšie uvedené obrázky popisujú jednoduché používanie prípravku Hyal-Drop® multi

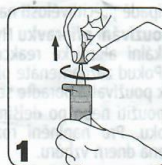

1. Pred každým použitím pootočením odstráňte priehľadný ochranný uzáver z hrotu fľaštičky. Uistite sa, že sa prstami ani inak nedotýkate hrotu fľaštičky.

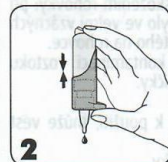

2. **POZOR! Pred prvým použitím a v prípade ak fľaštička nebola používaná dlhšiu dobu:** Držte fľaštičku hore dnom ako je znázornené na obrázku. Pred použitím stlačte palcom opierku približne 7x, alebo dovtedy kým sa v aplikátore neobjaví prvá kvapka.

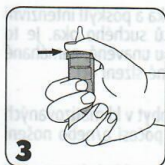

3. Fľaštičku uchopte tak, ako je uvedené na obrázku. Palec položte na ergonomickú opierku a dvoma prstami uchopte fľaštičku v spodnej časti.



4. Miernie zakloňte hlavu a podržte fľaštičku nad okom vo zvislej polohe tak ako je uvedené na obrázku nižšie. Pomocou ukazovávka voľnej ruky zľahka odťahnite dolné viečko smerom nadol a zároveň pevne stlačte opierku pre palec, tak kvapnite jednu kvapku do oka. Potom oko zatvorte a jemne ním zakrúžte, aby sa kvapka optimálne rozšíрила po celom oku. Pre dodatočnú oporu a lepšiu presnosť môžete použiť druhú ruku.

5. **Upozornenie:** hrot fľaštičky sa nesmie dostať do kontaktu s vašimi prstami alebo očami aby nedošlo k prípadnej kontaminácii roztoku. Celý postup zopakujte aj u druhého oka.

6. Ihneď po použití otraste nadbytočné kvapky a nasadte ochranný uzáver späť na hrot fľaštičky.

Deklarovaný objem roztoku vo fľaštičke môže byť použitý avšak, vzhľadom na konštrukciu fľaštičky malý zvyšok roztoku zostáva vo fľaštičke.

### Kedy nepoužívať Hyal-Drop® multi

Nepoužívajte Hyal-Drop® multi pokiaľ ste alergický na ktorúkoľvek zložku prípravku.

### Dôležité informácie týkajúce sa používania Hyal-Drop® multi

• V zriedkavých prípadoch boli zaznamenané lokálne alergické reakcie. Ak sa u vás vyskytnú, ukončíte používanie prípravku Hyal-Drop® multi.

• Upozorňujeme, že pri prvom použití alebo a v prípade ak fľaštička nebola používaná dlhšiu dobu je potrebné opakovane stlačiť aplikátor, až pokiaľ nie je pripravený na používanie. Po zaplnení mechanizmu pumpy roztokom, otočte fľaštičku hore dnom ako je uvedené na obrázku 4..

• **Bezpečnostné informácie pre pacientov s ťažkým poškodením rohovky:** pri užívaní prípravkov s obsahom fosforečnanu vápenatého bolo vo veľmi vzácných prípadoch zaznamenané ukladanie fosforečnanu vápenatého na rohovke.

- Nedotýkajte sa hrotom fľaštičky povrchu oka, aby ste predišli prípadnému zraneniu oka alebo kontaminácii (znečisteniu) roztoku.
- Po otvorení, fľaštičku nezdierajte s inými používateľmi.
- Používanie výrobku v rozpore s týmto návodom na používanie môže viesť k vypadnutiu fľaštičky z ruky a spôsobiť zranenie oka.
- Po aplikácii otraste všetky nadbytočné kvapky roztoku z fľaštičky.
- Pred použitím iného očného prípravku počkajte približne 15 minút.
- Nepoužívajte po dátume expirácie. Výrobok zlikvidujte 6 mesiacov po otvorení.
- Nepoužívajte v prípade poškodenia fľaštičky.
- Fľaštička Hyal-Drop® multi obsahuje malé plastové časti, ktoré by mohli prehltnúť malé deti. Hrozí nebezpečenstvo udusenía. Z toho dôvodu Hyal-Drop® multi uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

### Ako Hyal-Drop® multi uchovávať

Uchovávajte pri teplote od 1 °C do 25 °C.

Po otvorení používajte po dobu 6 mesiacov.

### Veľkosť balenia

Hyal-Drop® multi je dostupný v balení po 10 ml.

### Symbols

Symbol

CE 0483



Výrobca:  
Bausch & Lomb GmbH  
Brunsbütteler Damm 165 - 173,  
DE - 13581 Berlin, Nemecko



**Title**  
Nepoužívajte v prípade poškodenia fľaštičky.



Po otvorení používajte po dobu 6 mesiacov.



EXP:



LOT:



Uchovávajte pri teplote od 1°C -25 °C.



Prečítajte si návod na používanie.



Sterilizačná metóda, aseptická



Výstraha

**Dátum poslednej revízie: marec 2018**

®/™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Bausch & Lomb a jej dcérskych spoločností.

PTCZSK03 • 41832PB931/5-CZSK